

—— ペット保険対象商品 ——

anicom
アニコム損害保険株式会社


アニコム損保のペット保険では、本品を保険診療の一環として動物病院から購入された場合、保険の対象となります。

ipet アイベット
損害保険株式会社

アイベット損保では、本品を治療の一環として、獣医師の指示により販売・レンタルされた場合、保険の対象となります。



安心・快適・日本製
動物病院と
共同開発

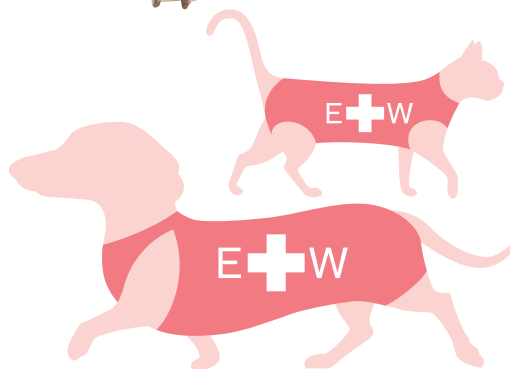

ストレスフリー設計で安心・快適

術後服

エリザベスウェア®


脱・カラー宣言。

「術後服エリザベスウェア®」で
普段と変わらない元気な生活を。

www.elizabethwear.jp



術後も安心・快適な
ズレない、脱げない
動きやすい
デザイン

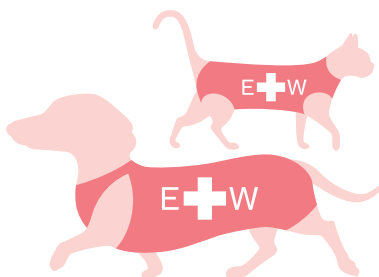

ストレスフリー設計で安心・快適

術後服 エリザベスウェア®



獣医師、オーナー様の
愛犬・愛猫を思う気持ちを「カタチ」に。
術後服エリザベスウェア®。



手術後の傷舐めを防止する首輪・エリザベスカラーは、
術後のワンちゃんネコちゃんにとって大きな負担になっていました。

「術後服エリザベスウェア®」は、服を着用することで
傷舐め防止と傷口保護をするという画期的な発想のウェア。

カラーのように動作を妨げることがないので、術後のストレスを大きく軽減できます。



出荷数

30,000
枚以上

病院提携件数

1,000
件以上

—— 2018年3月1日現在 ——

エリザベスウェア®商品開発ストーリー

「手術を終えたワンちゃんネコちゃんをもっと快適に過ごさせてあげたい」
「エリザベスウェア®」は、オーナー様たちのそんな思いを「カタチ」にした術後服。
愛犬・愛猫の体をやさしく包み、手術後の傷口保護をサポートします。



サロペットマナーパンツ

「マナーベルト」では防げなかったズレを解消する、ウェア感覚の「サロペットマナーパンツ」を開発。



バッククロスマナーパンツ

介護用マナーパンツの課題であった「サイズの許容範囲の狭さ」を解消する「バッククロスデザイン」のマナーパンツを開発。フルオブビガー独自のデザインです。



ダックス・小型・中型犬用／術後服エリザベスウェア®

動物病院との共同開発で、動きやすく、着用したままで排泄できる「術後服エリザベスウェア®」を考案。長年の研究が結実しました。



犬・猫用／皮膚保護服スキンウェア®

動物病院との共同研究で、皮膚病治療をサポートする多機能・高品質生地使用の犬・猫用「皮膚保護服スキンウェア®」を開発。



ダックス・小型・中型犬用／術後服エリザベスウェア®

より、お腹周りの傷口をカバーできる股ぐりに形状進化。さらに、多機能・高品質生地使用の小型・中型犬用「術後服エリザベスウェア®」を開発。



「カタチ」は獣医師、オーナー様の声で日々、研究・進化しています。

「エリザベスウェア®」を開発したのは、犬猫の服やマナーパンツを手がけてきた株式会社すとろーはうすのブランド「full of vigor(フルオブビガー)」。
オーナー様や動物病院の先生の声を取り入れて、ワンちゃんネコちゃんが安心して着られる「エリザベスウェア®」を製作。
現在も、形状・生地の見直しなど進化を続けています。

マナーベルト



ドッグカフェなどのマナー対策用として、幅広くズレにくい、簡単装着の「マナーベルト」を考案。

介護用マナーパンツ



サロペットマナーパンツをヘルニアなどの療養・介護に利用する需要が増えたため、ウェア型「介護用マナーパンツ」を商品化。

ルーパー付バッククロス型マナー&サニタリー&術後服兼用パンツ



さらに「安心・快適」「ズレない、脱げない、動きやすい」を追求した、可動式ルーパー付バッククロス型マナー&サニタリー&術後服兼用パンツに進化。

猫用／術後服エリザベスウェア®



猫用の術後服も研究し、体の柔らかい猫に着せやすく、脱げにくい「新バッククロスデザイン※」を開発。
※新バッククロスデザインは特許申請中、意匠登録済(第1554805号)です。

大型犬用／術後服エリザベスウェア®




着せやすく、脱げにくい「新バッククロスデザイン」を採用した大型犬用術後服を開発。

フレブル&バグ・中型犬用／術後服エリザベスウェア®



着せやすく、脱げにくい「新バッククロスデザイン」を採用したフレブル&バグ・中型犬用術後服を開発。

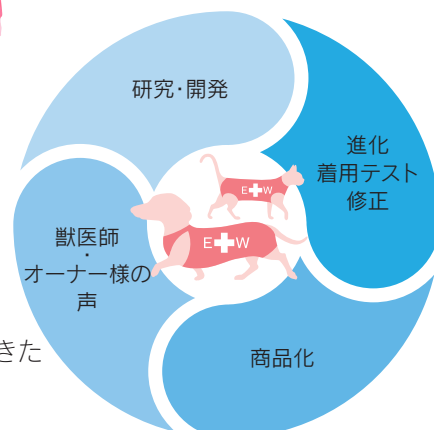

犬猫の服フルオブビガー



動物病院
獣医師



安心
快適
日本製



ズレない、脱げない、動きやすい「バッククロスデザイン」 ダックス・小型犬用 術後服エリザベスウェア®



「ズレない、脱げない、動きやすい」デザインを追求して、たどりついたのが当社考案の「バッククロスデザイン」。レディースウェアのタンクトップをヒントに考案した「バッククロスデザイン」は、首周り、胸周り、着丈に柔軟にフィットしつつ、どんな動きでもズレることがありません。着用後、クロス部分のルーパーを移動させ、首の寸法に合わせてご使用ください。

※類似品にご注意ください。



獣医師として、また愛犬家として、「術後服エリザベスウェア®」が一般に浸透することを願っています。

当院では、受付カウンターに「術後服エリザベスウェア®」をディスプレイしています。手術を控えられた、もしくは手術をされたオーナー様は、「術後の愛犬・愛猫をいたわるには、カラーよりもエリザベスウェア®が良い」と直感的に感じられるのか、何も説明しなくてもほとんどの方がエリザベスウェア®を選択されます。また、1枚ご購入されたオーナー様は、翌日に必ずと言っていいほど「洗い替えに」と2枚目3枚目をご購入しに来院されます。オーナー様はつらい手術後「できるだけいつも通りにしてやりたい、させてやりたい」という気持ちが強く、避妊手術などのように翌日から散歩もできる手術の場合は、ふだん通りの「動作」がとりやすいエリザベスウェア®を選択されるのは自然なことと思います。エリザベスウェア®は、傷口をカバーすることで愛犬・愛猫が自分で舐めるのを防ぐだけでなく、傷口とその周辺をやさしく抑えることで、痛みや不快感そのものを軽減できていると考えられます。エリザベスウェア®が開発されてからは「従来のカラーは、見た目も機能性も発展途中」と感じます。獣医師であり、愛犬家でもある私は、エリザベスウェア®が一般的に浸透することを心から願っています。

じよの動物病院
城塚隆宏院長






ズレない、脱げない、動きやすい バッククロスデザイン

「ズレない、脱げない、動きやすい」デザインを追求して、たどりついたのが当社考案の「バッククロスデザイン」。レディスウエアのタンクトップをヒントに考案した「バッククロスデザイン」は、首周り、胸周り、着丈に柔軟にフィットしつつ、どんな動きでもズレることがありません。着用後、クロス部分のルーパーを移動させ、首の寸法に合わせてご使用ください。※類似品にご注意ください。



体型に合わせて 面ファスナーでしっかり固定

ワンちゃんの体型は、犬種はもちろん、個体によってもさまざま。どんなワンちゃんにもフィットするように、背中に面ファスナーを採用。面ファスナーの四隅の角を丸くカットし、丸く縫うことで強度がアップし、ワンちゃんへの安全性も増しました。

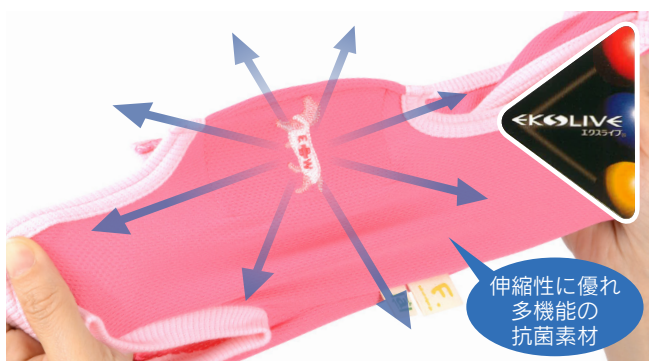

伸縮性に優れた抗菌素材で快適な着心地

生地は高品質かつ多機能の「エクスライブ加工」を採用。吸湿速乾性に優れ、消臭・抗菌効果でニオイや菌の発生を抑えます。また、健康な肌と同じ弱酸性領域をキープするpHコントロール機能、さらに静電気抑制機能、UVカット性、伸縮性も兼ね備えています。動きやすく、締めつけない着用感を保つために伸縮性にもこだわった素材を選んでいます。

【素材】本体／クール・デ・ホットエクス、部分使い／テレコspan

【品質】本体／ポリエステル100%、部分使い／綿95%、ポリウレタン5%



パンツ丈が長くなり、 さらに舐めにくい形に

お客様・病院様のご意見をもとに、よりお腹周りの傷口をカバーできる股ぐりに形状進化し、パンツ丈が長くなり、さらに舐めにくい形になりました。術後服は脱いでしまうと意味が無いので、脱げにくくする為に着脱は少ししにくくなりますので予めご了承ください。



独自の設計だから 排泄も安心、清潔に

術後服エリザベスウエア®は独自に開発した衛生的な設計パターンを採用しているため、着たままでウンチやおシッコを排泄できます。ただし、サイズが合わないものを着用すると排泄物が付着することがありますので、サイズがご不明な場合は弊社にお問い合わせください。




ダックス・小型犬まで 男の子・女の子それぞれ10サイズ展開

術後の体の負担を減らすため、余計なサイズ調整の器具を付けずにできるだけピッタリのサイズを着てもらいたいという思いから、ダックス・小型犬の男の子用、女の子用それぞれ10サイズをご用意しました。一番近いサイズをご利用いただくことでまるでワンちゃんは着ていないかのようなストレスフリーな生活が出来ます。※フレブル・中型・大型犬用は5ページにございます。



なで肩の多い犬種と猫に最適な「新バッククロスデザイン」 フレブル・中型・大型犬・猫用 術後服エリザベスウェア®

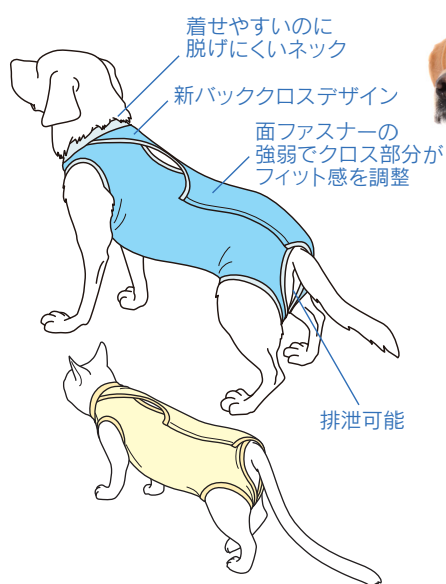


なで肩の大型犬と猫の場合、旧バッククロスタイプではどうしてもクロス部分の肩紐がズレてしまう為、新バッククロスタイプではネック部分は固定し更にバッククロス部分を一体化させる事でバッククロス機能を損なわずズレにくいデザインを実現しました。首回りの寸法は何度も試作を重ね、着せやすさを実現しながらも脱げにくい寸法を実現しています。

※新バッククロスデザインは特許申請中、意匠登録済(第1554805号)です。



伸縮性に優れた抗菌素材で快適な着心地

生地は高品質かつ多機能の「エクスライブ加工」を採用。吸湿速乾性に優れ、消臭・抗菌効果でニオイや菌の発生を抑えます。また、健康な肌と同じ弱酸性領域をキープするpHコントロール機能、さらに静電気抑制機能、UVカット性、伸縮性も兼ね備えています。動きやすく、締めつけのない着用感を保つために伸縮性にもこだわった素材を選んでいます。

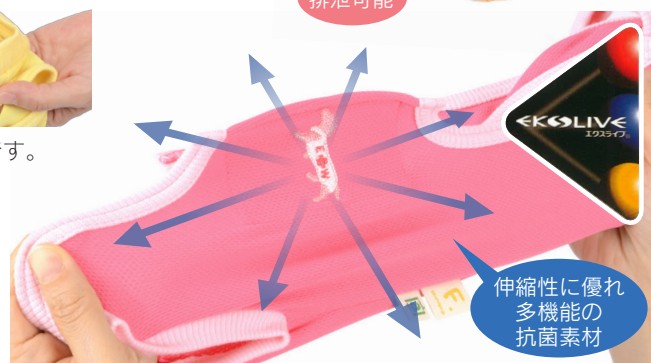

[素材] 本体/クール・デ・ホットエクス、部分使い/テレコスパン
 [品質] 本体/ポリエステル100%、部分使い/綿95%、ポリウレタン5%



体型に合わせて 面ファスナーでしっかり固定

ワンちゃん・ネコちゃんの体型は、犬種・猫種はもちろん、個体によってもさまざま。どんなワンちゃん・ネコちゃんにもフィットするように、背中に面ファスナーを採用。面ファスナーの四隅の角を丸くカットし、丸く縫うことで強度がアップし、ワンちゃん・ネコちゃんへの安全性も増しました。

※毛の長い猫は長時間着用していると毛玉ができることがあります。



パンツ丈が長くなり、 さらに舐めにくい形に

お客様・病院様のご意見をもとに、よりお腹周りの傷口をカバーできる股ぐりに形状進化し、パンツ丈が長くなり、さらに舐めにくい形になりました。術後服は脱いでしまうと意味が無いので、脱げにくくする為に着脱は少ししにくくなりますので予めご了承ください。



幅広い犬種に対応した フレブル3、中型犬3、大型犬4サイズ展開

術後の体の負担を減らすため、余計なサイズ調整の器具を付けずにできるだけピッタリのサイズを着てもらいたいという思いから、フレブル・中型犬は男の子用、女の子用それぞれ3サイズ、大型犬は男の子用、女の子用それぞれ4サイズをご用意しました。一番近いサイズをご利用いただくことでまるでワンちゃんは着ていないかのようなストレスフリーな生活がおくれます。※ダックス・小型犬用は3ページにございます。



独自の設計だから 排泄も安心、清潔に

術後服エリザベスウェア®は独自に開発した衛生的な設計パターンを採用しているの、着たままでウンチやオシッコを排泄できます。ただし、サイズが合わないものを着用すると排泄物が付着することがありますので、サイズがご不明な場合は弊社にお問い合わせください。



独自の設計だから 排泄も安心、清潔に

男の子・女の子
兼用

術後服エリザベスウェア®は着たままで排泄しても大丈夫。ただし、サイズが合わないものを着用すると、ウンチやオシッコが付着することがありますので、手術前に獣医師とサイズをご相談ください。

※男の子の去勢手術には適していません。



仔猫から成猫、 太めの体型へもサイズ対応

猫用
6サイズ展開

術後の体の負担を減らすため、余計なサイズ調整の器具を付けずにできるだけピッタリのサイズを着てもらいたいという思いから、仔猫から成猫、太めの体型のネコちゃんまで、男の子用、女の子用兼用の6サイズをご用意しました。一番近いサイズをご利用いただくことでまるでネコちゃんは着ていないかのようなストレスフリーな生活がおくれます。

実際にお取扱いただいている病院様の声

乳腺腫瘍の術後の傷口保護

神戸O動物病院 H院長

乳がんの手術後にエリザベスウェア®を着用して、本当に助かっています。フィット感が良いからか、脱いだり噛んだりすることもないように思います。患者さんの評価も良く、「どんな服も嫌がる子がこの服だけは嫌がらない」と、日常用に購入された方もおられました。



経鼻カテーテル

神戸O動物病院 H院長

チューブ縫着用の下着があっても上着が自然な着用感で猫が嫌がらない、服が脱げる心配、チューブの脱落の心配が無くなった。面ファスナーの開閉で、チューブの出し入れが簡単になった。などのメリットを感じております。



避妊去勢

春日丘動物病院 今西院長

当院では、主に去勢手術、避妊手術の後の手術部位を動物みずから舐めすぎてしまうことを防止するためにエリザベスウェア®を利用させていただいています。今まで、首に取り付けるカラーを利用していましたが、食餌がしにくかったり、カラーがあることでいろいろと生活に不自由が出てしまい問題もありました。しかし、エリザベスウェア®ならこのような術後のストレスをできる限り軽減してくれるので、費用はかかりますが、多くの飼い主様に満足していただいているので、ご紹介、推奨させていただいています。



ストレスに弱い猫の術後管理に

動物レーザーセンター動物病院 関 昌弘院長


猫はストレスに非常に弱い動物です。術後にエリザベスカラーを長期間つけていると、飲食がしにくく、自由に動き回ることもできず、大きなストレスになります。この「術後服エリザベスウェア®」なら着せやすく動きやすいので、ストレスを減らすことができると思います。「術後服エリザベスウェア®」をいくつかの症例で使ってみますと、猫は思った以上に嫌がることもなく、抜糸まで着続けてくれました。なかには背中の中毛づくろいをしようとして、術後服の上から舌で舐めた例がありましたが、それでも服が破れたりすることなく、傷もきちんと守れていました。また、猫は犬よりも体が柔らかいため、脱げやすいのではないかと心配しましたが、首の部分がしっかりフィットしているので大丈夫でした。使っていただいた飼い主様からも「手術した後のネコちゃんが動き回りやすく、自由にしているので良かった」というご意見をいただいています。これまでは猫用の術後服がなかったため、いやおうなしにエリザベスカラーをつけてストレスを与えていましたが、「術後服エリザベスウェア®」が利用できるようになって低ストレスの術後管理ができるようになりました。ご飯も食べやすく、動きやすくなったので、飼い主様にも喜ばれています。



チューブ噛み防止

じよの動物病院 城塚隆宏院長

尿道カテーテルを入れる治療では、カテーテルチューブを入れた後、エリザベスウェア®を着せてチューブ先端をウェアの中に入れることで、チューブ噛みを防止することができました。

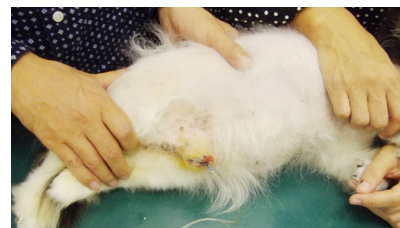

テープ負けで皮膚炎症を起こしたために術後服へ切替えた例



じよの動物病院 城塚隆宏院長

お腹から排液チューブを入れ、バンテージをした治療では、上の皮膚がテープ負けによる炎症を起こしたために、エリザベスウェア®に切り替えました。



大腿骨頭壊死の手術と避妊手術を行った例

じよの動物病院 城塚隆宏院長

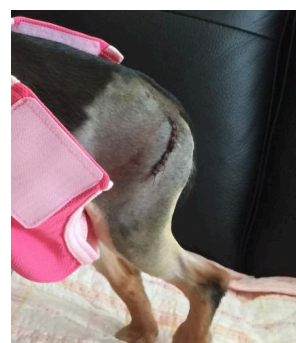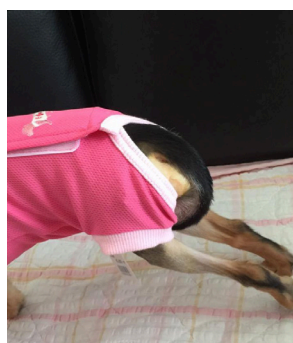

陰囊部分の掻き壊し部分の保護

じよの動物病院 城塚隆宏院長

小さなカラーだと縁で傷つけてしまうデリケートな部分なので、大きなサイズのカラーが必要でした。しかし、エリザベスウェア®なら縁で傷口を傷めることもないので、両方を着比べていただいた結果、エリザベスウェア®の方がいいと喜んでいただけました。



展示実績

- 第13回～第16回 日本獣医がん学会
- 2015年～2017年 春季合同学会
- 第35回～第38回 動物臨床医学年次大会
- 平成26年度 日本獣医師会獣医学術学会年次大会
- 日本獣医内科学アカデミー 学術大会 (JCVIM2015～2018)
- 第17回～第19回 日本臨床獣医学フォーラム年次大会
- 第19回日本臨床獣医学フォーラム東北地区大会
- 第16回日本臨床獣医学フォーラム九州地区大会




着用方法

ダックス・小型犬用 バッククロスデザイン



1 背中のルーパー部分をクロスさせ輪を作ります。

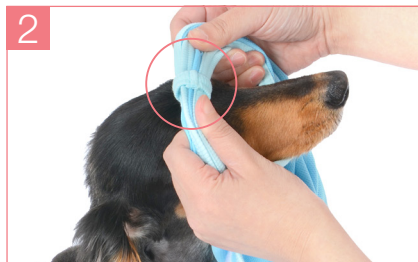

2 ルーパー部分を上にして輪から頭を通します。刺繍のある面ファスナーが背中側になります。



3 前足から片方ずつ通します。



4 後足を片方ずつ通します。



5 面ファスナーでサイズを調整し固定します。




6 クロス部分のルーパーを移動させ、ねじれや間違いがないか全体を確認しバランスを整えれば完成です。

フレブル・中型犬・大型犬用 新バッククロスデザイン


※新バッククロスは特許申請中、意匠登録済(第1554805号)のデザインです。




1 頭を入れる輪を作ります。頭を先に通すことで着用が楽になります。

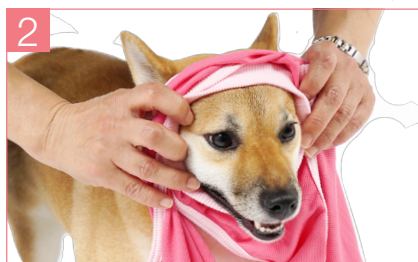

2 輪から頭を通します。刺繍のある面ファスナーが背中側になります。

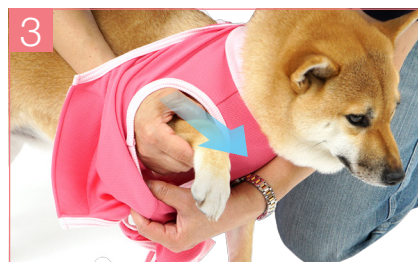

3 前足から片方ずつ通します。

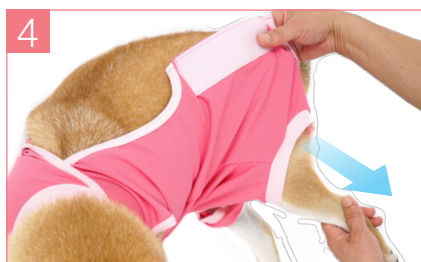

4 後足を片方ずつ通します。



5 面ファスナーでサイズを調整し固定します。




6 ねじれや間違いがないか全体を確認しバランスを整えれば完成です。

※普段お洋服を着用されていない子は、エリザベスウエア®着用後しばらくは、歩き方がぎこちなかったり、コロンと倒れてしまう場合があります。歩きなれるまでは、そばで見守ってあげてください。
※大きめのサイズを着用されますと隙間より傷口に舌が届く場合があります。 ※術後服は脱いでしまうと意味が無いので、脱げにくくする為に着脱は少ししにくくなります。予めご了承ください。

猫用

新バッククロスデザイン

※新バッククロスは特許申請中、意匠登録済(第1554805号)のデザインです。

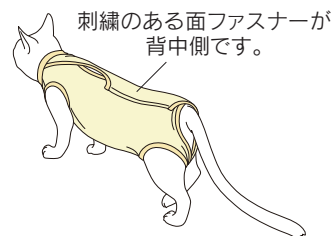

頭を入れる輪を作ります。
頭さえ通せば着用が楽になります。



輪から頭を通します。
刺繍のある面ファスナーが背中側になります。



前足から片方ずつ通します。



後足を片方ずつ通します。



面ファスナーでサイズを調整し固定します。



ねじれや間違いないか全体を確認し
バランスを整えれば完成です。

商品サイズ

対 象	サイズ	犬・猫の実寸の許容範囲(ヌードサイズ)				
		首周り(cm)	胸周り(cm)	お腹周り(cm)	着丈(cm)	体重(kg)
ダックス ダックスやトイプードル 胸が長めの犬種 など	D2S(DSS)	約20～	約31～	約26～	約28.5～	約2.5～
	DS	約22～	約34～	約28.5～	約31.5～	約3～
	DM	約24～	約36～	約31～	約34～	約4～
	DML	約26～	約39～	約33.5～	約36～	約5.5～
	DL	約29～	約43～	約36.5～	約39.5～	約6.5～
小型犬 比較的胸の長くない犬種 ボメラニアン チワワ・シーズー など	N2S(NSS)	約18.5～	約28～	約24.5～	約22～	約1.5～
	NS	約21～	約32～	約27.5～	約24.5～	約2～
	NM	約24～	約36～	約31～	約28～	約3.5～
	NML	約26～	約39～	約33.5～	約30～	約4.5～
	NL	約29～	約43～	約36.5～	約33～	約6～
フレンチ ブルドッグ パグ	FS	約33～	約48～	約42～	約28～	約7～
	FM	約35.5～	約51.5～	約45～	約30～	約10～
	FL	約38～	約55～	約48～	約32.5～	約12～
中型犬 柴犬、キャバリア ミニチュアシュナウザーなど	N2L(NLL)	約32～	約48～	約41～	約37～	約8～
	N3L	約34.5～	約51.5～	約44～	約39.5～	約10～
	NXL	約36.5～	約55～	約47～	約42～	約13～
大型犬 秋田犬、ダルメシアン ゴールデンレトリバー など	BS	約36～	約60～	約50～	約45～	約15～
	BM	約38～	約64.5～	約54～	約48.5～	約20～
	BL	約41～	約69～	約57.5～	約52～	約24～
	B2L	約46～	約76.5～	約64～	約57.5～	約28～
猫	C3S	約13～15	約28.5～	約29.5～	約23～	約1.5～
	C2S	約15～18	約31.5～	約32.5～	約27～	約2.5～
	CS	約17～21	約34.5～	約35.5～	約31～	約3.5～
	CM	約19～24	約37.5～	約38.5～	約35～	約4.5～
	CL	約21～27	約40.5～	約41.5～	約39～	約5.5～
	C2L	約23～30	約44.5～	約45.5～	約40～	約6～

種 類	術 後 服 エリザベスウェア®																				
対 象	犬									猫											
	ダックス・小型犬		フレンチブルドッグ・パグ		中型犬		大型犬														
性 別	男の子	女の子	男の子	女の子	男の子	女の子	男の子	女の子	男女兼用												
商品写真																					
色	7 ブルー	6 ピンク	7 ブルー	6 ピンク	7 ブルー	6 ピンク	7 ブルー	6 ピンク	8イエロー												
品 番	14-06203-1	13-06112-1	18-06016-1	17-06037-1	15-06068-1	14-06089-1	16-06160-1	16-06159-1	16-06070-1												
サイズ	ダックス D2S DS DM DML DL 小型犬 N2S NS NM NML NL		FS FM FL		N2L N3L NXL		BS BM BL B2L		C3S C2S CS CM CL C2L												
買主様への販売価格	¥2,900 (税別)		¥3,900 (税別)		¥3,900 (税別)		¥4,900 (税別)		¥2,900 (税別)												
素 材	クール・デ・ホットエクス(エクスライブ加工) 暑いときには放湿による冷却、寒いときには吸湿による発熱と2つの機能を併せ持つハイブリッド素材です。夏は涼しく、冬は暖かい通年着用できる高機能な素材です。伸縮性に加え、吸水速乾性にも優れ、消臭・抗菌効果もあり、菌が発する悪臭も抑えます。縦横斜めに適度な伸縮性があり、ワンちゃんネコちゃんの負担になりにくい着心地です。 発汗感知・吸湿発熱・放湿冷却・自己乾燥・通気性 pHコントロール機能・静電気抑制・UVカット  素材(品質) ● 本 体 クール・デ・ホットエクス(ポリエステル100%) ● 部分使い/テレコスパン(綿95%・ポリウレタン5%) ● 日本製   伸縮性  厚 さ   ※レベルはウェア全体の平均の伸縮性、厚さを示したものです。 袖部分など各部分の伸縮性は若干異なります。 <tr><th>仕 様</th><td colspan="2">バッククロスタイプ 着用後、クロス部分のルーバーを移動させ、首の寸法に合わせてご使用ください。</td><td colspan="8">新バッククロスタイプ なで肩の多い犬種・猫に適応した独自のデザインです。 首周り、胸周り、着丈に柔軟にフィットしつつ、 どんな動きでもズレることがありません。</td></tr>										仕 様	バッククロスタイプ 着用後、クロス部分のルーバーを移動させ、首の寸法に合わせてご使用ください。		新バッククロスタイプ なで肩の多い犬種・猫に適応した独自のデザインです。 首周り、胸周り、着丈に柔軟にフィットしつつ、 どんな動きでもズレることがありません。							
仕 様	バッククロスタイプ 着用後、クロス部分のルーバーを移動させ、首の寸法に合わせてご使用ください。		新バッククロスタイプ なで肩の多い犬種・猫に適応した独自のデザインです。 首周り、胸周り、着丈に柔軟にフィットしつつ、 どんな動きでもズレることがありません。																		

認定商品



神戸セレクション

神戸らしいお洒落で質の高い商品を公募・選定し、インターネットモールや各地の百貨店等で展示・販売会を実施することにより、神戸経済の活性化と新たな神戸ブランドの創出を目指す事業です。



神戸ドリームキャッチプロジェクト

新規創業、新規事業立ち上げ、新分野進出などを考える、個人、ベンチャー企業、中小企業のビジネスプランを評価委員会で審査し認定されたプランを神戸が全力でサポートするプロジェクトです。

商標登録

【エリザベスウェア】は株式会社すとりーはうすの登録商標です。【登録第5683505号】
【新バッククロス】は特許申請中、意匠登録済(第1554805号)のデザインです。

協賛

東京都獣医師協同組合
日本獣医がん学会 (JVCS)
日本獣医麻酔外科学会 (JSVAS)

推奨

名古屋市獣医師協同組合

デザイン



ペット保険対象商品



アニコム損保のペット保険では、本品を保険診療の一環として動物病院から購入された場合、保険の対象となります。



アイペット損保では、本品を治療の一環として、獣医師の指示により販売・レンタルされた場合、保険の対象となります。