


着用方法

ダックス・小型犬用 バッククロスデザイン



背中中のルーパー部分を
クロスさせ輪を作ります。

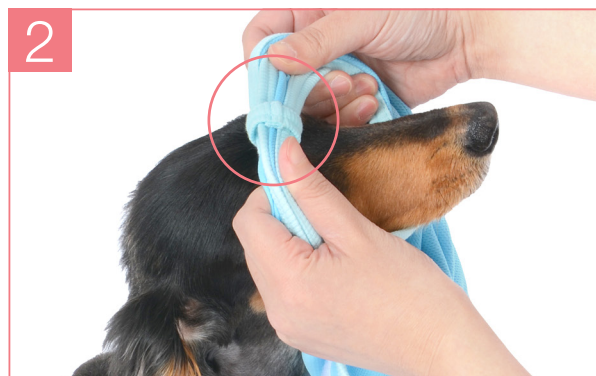

ルーパー部分を上にして輪から頭を通します。
刺繍のある面ファスナーが背中側になります。



前足から片方ずつ通します。



後足を片方ずつ通します。



面ファスナーでサイズを調整し固定します。



クロス部分のルーパーを移動させ、
ねじれや間違いがないか全体を確認し
バランスを整えれば完成です。


着用方法

フレブル・中型犬・大型犬用 新バッククロスデザイン

※新バッククロスは特許申請中、意匠登録済(第1554805号)のデザインです。



1
頭を入れる輪を作ります。
頭を先に通すことで着用が楽になります。

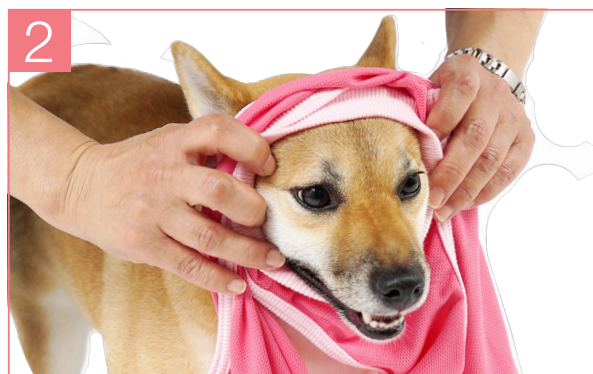

2
輪から頭を通します。
刺繍のある面ファスナーが背中側になります。



3
前足から片方ずつ通します。



4
後足を片方ずつ通します。



5
面ファスナーでサイズを調整し固定します。




6
ねじれや間違いがないか全体を確認し
バランスを整えれば完成です。

着用方法

猫用

新バッククロスデザイン

※新バッククロスは特許申請中、意匠登録済(第1554805号)のデザインです。

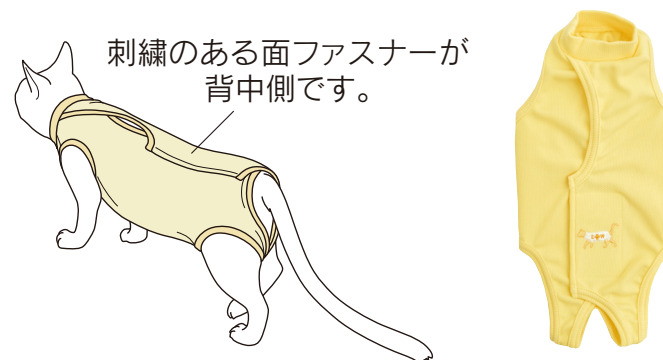

頭を入れる輪を作ります。
頭さえ通せば着用が楽になります。



輪から頭を通します。
刺繍のある面ファスナーが背中側になります。



前足から片方ずつ通します。



後足を片方ずつ通します。



面ファスナーでサイズを調整し固定します。



ねじれや間違いがないか全体を確認し
バランスを整えれば完成です。